


尿バッグが肌に触れず、目立たず隠せる

ユーリンMB・ポケットセット 日本製

肌に触れない『ポケット収納』で、
尿バッグの快適な使用をサポートします。

500mlまで対応

腰から吊るしてずれ防止

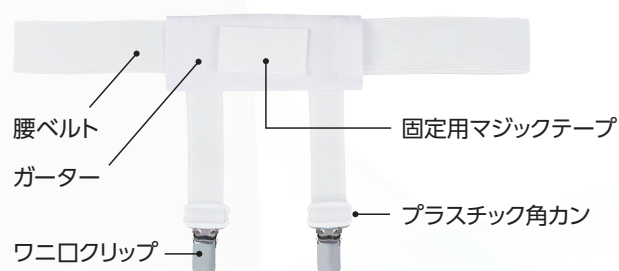

排尿チューブ出し入れ口


サ イ ズ：【ポケット】横150mm×縦230mm
材 質：【ポケット】綿、ポリエステル、ナイロン、アクリル
【ベルト】ラテックスゴム、ポリエステル、レーヨン、亜鉛合金
【ガーター】綿、ポリエステル、ポリアセタール、亜鉛合金
適 用 範 囲：63-95cm

ユーリンMB・ポケットセットの使用方法

- ① ガーターに付いているフニロクリップで、ポケットの中にあるベルトの端部分を挟みます。



- ② ベルトの長さをご自身のウエストに合わせて調節します。

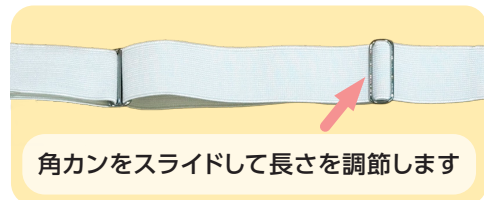


- ③ ご使用になる尿バッグをポケットの中に入れます。

- ④ 装着が完了したら、体から出ている排尿管と尿バッグの接続管をつなぎます。
接続の際は清潔操作をしてください。



- ⑤ ガーターのベルト部分でも高さの調節ができます。

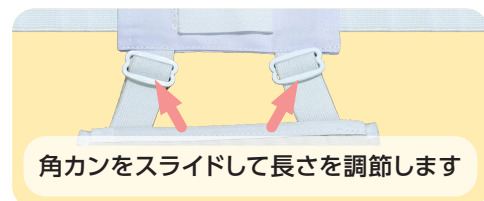

- ⑥ ガーター本体に付いているマジックテープを使用して、チューブの固定ができます。



【使用上の注意】

- ユーリンMB・ポケットセットは、ユーリン・ミニ・バッグ(350ml、500ml)を収納するために使用します。それ以外の用途でのご使用はしないでください。
- ご自身の都合で、他社のバッグを吊り下げたい場合には、十分ご確認の上、自己責任での使用をお願いします。
- バッグにつきましては、バッグの使用上の注意をご確認ください。
- 金属製のフニロクリップを使用していますので、磁気共鳴装置類(MRI、MRA等)使用の際には必ず外してください。

【洗濯方法】



商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
ユーリンMB・ポケットセット	N10110	1セット	袋	4,500円(税別)	4517850001874
ユーリンMB・ポケット	N10120	1枚	袋	2,000円(税別)	4517850001881
ユーリンMB・ポケット用ベルト	N10130	1本	袋	1,000円(税別)	4517850001898
ユーリンMB・ポケット用ガーター	N10140	1個	袋	1,500円(税別)	4517850001904

あしかメディ工業株式会社

本社: 〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12 TEL 03-3811-0234 FAX 03-3812-9284
 綾瀬事業所: 〒120-0003 東京都足立区東和3-5-4
 白井事業所: 〒270-1403 千葉県白井市河原子240-17
 yes@asicamedy.co.jp



ISO9001:2015 認証取得