

# ユーリン・ミニ・バッグ

## 尿管皮膚瘻用・携帯採尿バッグ

〔障害者総合支援法の「日常生活用具」に該当し非課税です〕

2種類の  
容量バッグ

日常用 350ml バッグ


夜間用 1,000ml バッグ

本バッグは尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱で、患者さんと専門家の協力により開発された商品です。社会復帰の場合日常生活ができるだけ抵抗なく出来るように、小型、軽量、肌への密着性と感染防止のための逆流防止弁使用など広い角度から検討を加え製品化しましたので、安心してご使用いただけます。

### 特長


- 1 小型で軽く、装着しても行動は自由です。装着したバッグは外部から目立ちません。
- 2 バッグ内の尿はどんな体位でも逆流防止弁により逆流しません。
- 3 バルーンカテーテル、ネラトンカテーテル用 2 種類の接続管が付属しています。
- 4 ネジ付き排液栓はどのような動作でも漏れる心配はありません。
- 5 在宅時又は就寝の場合は夜間用 1,000ml バッグをご使用になれば、夜間尿処置の問題もなく安心して睡眠できます。
- 6 足ベルト(2本)のみでバッグを装着することも可能です。

・特タイプの番号を必ずご指示ください。

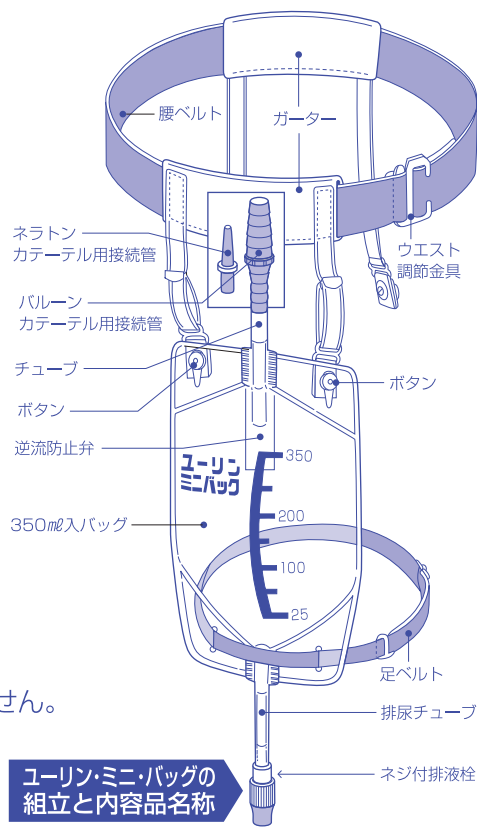

ユーリン・ミニ・バッグの組立と内容品名称

〔付属品〕

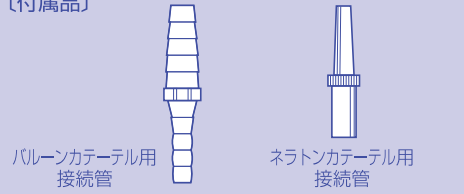

非課税	各種セット包装内容		品番 / 価格
	セット	350ml バッグ/4枚・腰ベルト/1本 バッグ下げガーター/2本・足ベルト/2本 排液栓/4個・接続管(2種)/各4個	N10012 ¥5,200
	バッグのみ 日常用	350ml バッグ/6枚・排液栓/6個 接続管(2種)/各6個	N10013 ¥3,500
バッグのみ 夜間用	1,000ml バッグ/5枚・排液栓/5個 接続管(2種)/各5個	N10033 ¥4,500	

ベルト包装内容		品番 / 価格
ベルトセット	腰ベルト/1本 バッグ下げガーター/2本 足ベルト/2本	N10012A ¥2,800 (税別)
腰ベルト	腰ベルト 1本 バッグ下げガーター/2本	¥2,200 (税別)
足ベルト	1本	¥300(税別)

ユーリン・ミニ・バッグは標準タイプの商品の他、ご希望により特タイプを3種ご用意しております。ご注文に際し、特タイプをお選びの場合、品名・品番・特タイプの番号を必ずご指示ください。▶▶▶▶▶▶

例 N10013B  
ユーリン・ミニ・バッグ日常用  
特タイプ①


#### 《標準タイプ品》

接続管 差込式




#### 《特タイプ①》

接続管 差込式

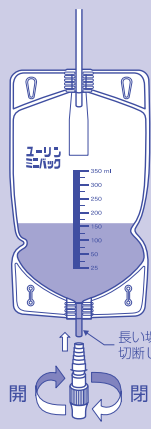


#### 《特タイプ②》

N 接続管 接着済

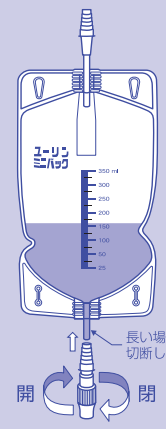

#### 《特タイプ③》

N 接続管 接着済

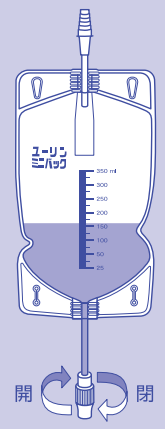

## あしかメディ工業株式会社

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12  
TEL03-3811-0234 FAX03-3812-9284

<URL><http://www.asicamed.co.jp> <e-mail>[yes@asicamed.co.jp](mailto:yes@asicamed.co.jp)







※型状、材質など用途に差支えない範囲で仕様を変更することがあります。



**△** ご使用になる前にご確認下さい。  
 ・ネジ付排液栓（ブルー色）は開いていますので、必ず閉めてからお使い下さい。

## 装着の仕方


- ① 腰ベルトにガーターが2本装着されておりますが、バッグを1枚だけご使用の場合は予め1本を取り外して下さい。
- ② ガーターのボタンにバッグを取り付けて下さい。
- ③ ベルトの長さを自分のウエストに合わせて調節し、ガーターを必要な位置に移動させて装着して下さい。
- ④ 排液栓が閉まっている事を確認して下さい。
- ⑤ 装着がすんだら、身体から出ている尿管と接続管をつないで下さい。  
 バルンカテーテルと接続の際、接続管のツバの上の部分は指でさわらぬようご注意ください。
- ⑥ バッグの下部を固定バンドで太ももに固定します。
- ⑦ ベルトのガーター部分を図のようにマジックテープを剥がし、バッグ上のチューブを挟み込み、マジックテープを貼り付けて下さい。
- ⑧ バッグがいっぱいになったら排液栓のネジをゆるめて、便器等に尿を捨てて下さい。

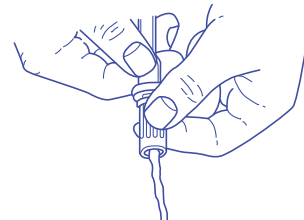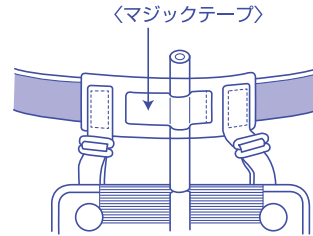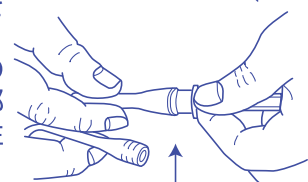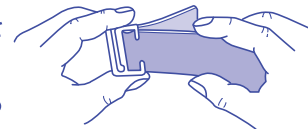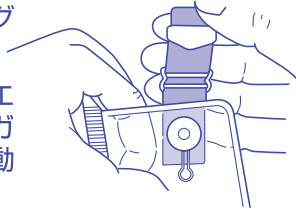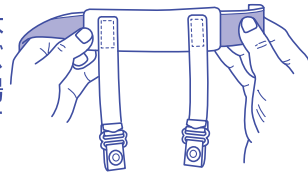

※接続管2種の内、カテーテル先端の径と合う品をご使用下さい。

## ご使用上の注意

- ・初めてご使用の場合は、かかりつけの先生又は看護師さんに指導を受けて下さい。  
 この使用書を読んでもご使用になれますが、専門家の指導を受けられればより安心です。
- ・身体からのカテーテルと接続管はしっかり接続させて下さい。接続が不完全なために、尿が漏れることがあります。
- ・バッグに圧力がかかっても逆流防止弁の作用で尿は逆流しません。しかし瞬間的に強い衝撃がかかりますと接着面が剥がれる危険があります。  
 過激な運動や作業をするときはご注意ください。
- ・バッグを交換の場合、バルンカテーテル等と接続の際は、接続管の先端部分（カテーテルの中に入る部分）をアルコール等で消毒して下さい。
- ・皮膚の弱い方はバッグと皮膚の間にガーゼをあてて下さい。
- ・就寝時にはバッグを置く位置にご注意下さい。  
 チューブがねじれたり折れたりして尿の流れが阻害されることがあります。
- ・バッグを装着し、すわったり、腰掛けたりする場合は、バッグの中の逆流防止弁が折れないように注意して下さい。  
 弁が折れますと尿がバッグに流れなくなります。長時間座ったりする場合はバッグの位置をずらすなど工夫して下さい。  
 弁に折れぐせがつきますと元に戻らなくなります。

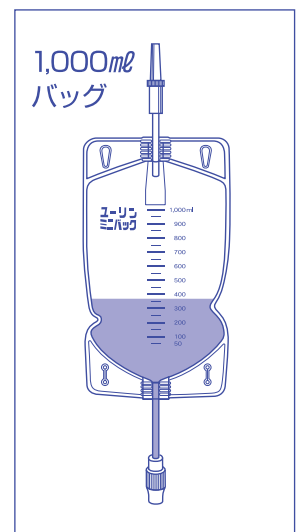

## 【夜間就寝用1,000mlバッグ】

本品は全量1,000mlの夜間用バッグです。就寝時350mlバッグを1,000mlバッグと交換使用下されば、夜間に尿を捨てる必要がなく安眠ができます。

## ■バッグの使用期間について

バッグが汚れますと感染の原因にもなりますので、ご使用開始より7～10日間を目安に新しいバッグと交換して下さい。

**\*当品は、障害者総合支援法の『日常生活用具』で非課税です。**



ご使用になる前にご確認下さい。  
・ネジ付排液栓（ブルー色）は、必ず閉めてからお使い下さい。

## ■装着の仕方

マジックテープやチューブを切る際は、ケガにご注意ください

①腰ベルトの長さをご自身のウエストに合わせて調整してください。折り返して止めるだけなので簡単です。プラスチック角カンが気になる方はガーターをスライドさせて隠せます。

②ガーターに付いているフニクリップでバッグをはさみ、取り付けてください。フニクリップを固定するマジックテープ部分はご自由に切って長さを調整できます。

③バッグの下部に伸縮足ベルトを通します。

④この状態で太ももに、フィットするのを確認して固定します。




⑤バッグ下部のチューブにネジ付排液栓を取り付けます。この際に必ずネジを閉めてください。チューブを切って長さを調整できます。

⑥バッグ上部のチューブに接続管を取り付けます。チューブを切って長さを調整できます。


⑦体から出ている尿管と接続管をつないでください。尿管から尿が漏れないように注意してください。接続の際は清潔に操作してください。

⑧ガーター部分のマジックテープをはがして、上部チューブもしくは尿管をはさみ込むことで固定できます。

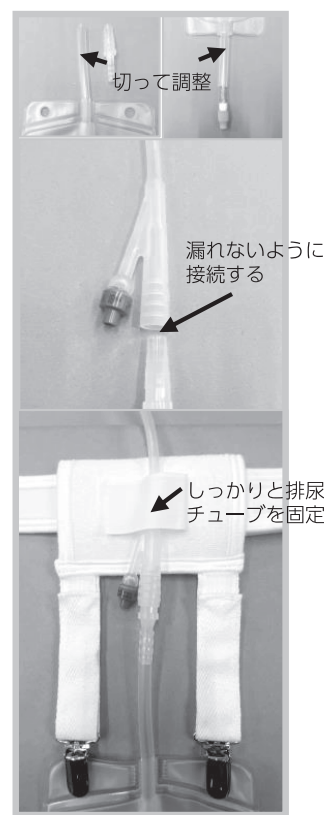

## ■ご使用上の注意

- ・初めてご使用の場合は、担当の医師又は看護師の指導を受けて下さい。この使用書を読んでもご使用になれますが、専門家の指導を受けられればより安心です。
- ・体から出ているカテーテルと接続管はしっかりと接続して下さい。接続が不完全な場合、尿が漏れることがあります。
- ・バッグに圧力がかかっても逆流防止弁の作用で尿は逆流しません。しかし瞬間的に強い衝撃がかかりますと接着面が剥がれて逆流する危険があります。激しい運動や作業をするときはご注意ください。
- ・バッグの交換時、バルーンカテーテルと接続の際は、接続管の先端部分（カテーテルの中に入る部分）をアルコール等で消毒して下さい。
- ・皮膚の弱い方はバッグと皮膚の間にガーゼをあてて下さい。
- ・就寝時はバッグを置く位置にご注意ください。チューブがねじれたり折れたりして尿の流れが阻害されることがあります。
- ・バッグを装着し、すわったり、寝転んだりする場合は、バッグの中の逆流防止弁が折れないように注意して下さい。弁が折れますと尿がバッグに流れなくなります。長時間座ったりする場合はバッグの位置をずらすなど工夫して下さい。弁に折れぐせがつきますと元に戻らなくなります。

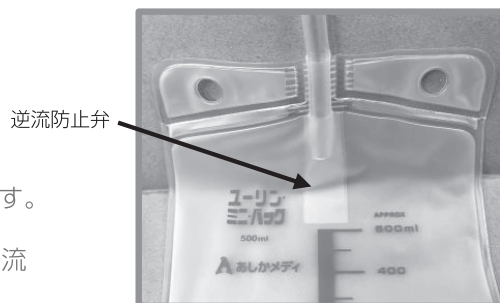

▲図のように逆流防止弁に折れぐせがつくと尿がバッグ内に流れにくくなります。

## ■バッグの使用期間について

バッグが汚れますと感染の原因にもなりますので、ご使用開始より7～10日間を目安に新しいバッグと交換して下さい。

当製品は、障害者総合支援法により、非課税です