

排液作業を簡単に

スタンド式排液袋 2L

日本製

ディスポーザブル

- 排液バッグから液を出す際の受け袋です。
- 目盛を省き、シンプルな形状にすることで、コストを抑えました。

Point 1

袋タイプ

保管・移動の省スペース化
廃棄の際もかさばりません

Point 2

自立式


安定しているので作業がしやすい



Point 3

チャック付

移動するときに
こぼす心配がありません

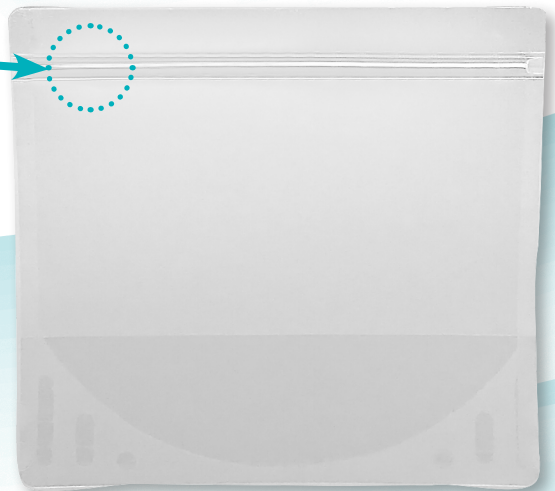

材 質: ポリプロピレン
サ イ ズ: 横 270mm × 縦 250mm × マチ 80mm
重 量: 約 11 g
容 量: 2,000ml

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
スタンド式排液袋 2L 50枚入	N10094	50枚	袋	4,000円(税別)	4517850001812

スタンド式排液袋の使用例 (ウロバッグから尿の排液)

※ 使用時は個人用防護具(PPE)の着用をおすすめします

1



袋底を広げて自立させます。
ウロバッグの下に置いて尿を袋に排液します。
袋に油性ペンで患者様の名前を書くこともできます。

2



排液後、上部チャックをしっかりと閉めます。
移動の際は袋の上部を持ち、
落とさないように気を付けてください。

3



汚物槽またはトイレまで移動後、
チャックを開け尿を丁寧に廃棄してください。

4



尿を廃棄後の袋は指定のごみ箱に捨ててください。
袋ですので、かさばらずに廃棄できます。
保管の際も場所を取りません。

あしかメディ工業株式会社

本社: 〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12 TEL 03-3811-0234 FAX 03-3812-9284

綾瀬事業所: 〒120-0003 東京都足立区東和3-5-4

白井事業所: 〒270-1403 千葉県白井市河原原子240-17

yes@asicamedi.co.jp