

しっかり固定できて、肌に優しい

ユーリンMB・ソフトベルト

日本製

ユーリン・ミニ・バッグ[夜間用]を
装着したい方のために作りました。1,000ml
まで対応装着
かんたん

最大容量1,000mlが入っても吊り下げることができます。
装着も簡単になり、直接肌に当てても優しい素材にしました。
太ももにバッグを装着した際の安定感を是非お試しください。

プラスチック角カン

固定用マジックテープ

別売
ユーリン・ミニ・バッグ[夜間用]

腰ベルト

ガーター

ワニ口クリップ
(シリコン付き)


伸縮足ベルト

材 質：綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
《クリップ部》鉄、シリコン
適 用 範 囲：ウエスト55cm～95cm
《伸縮足ベルト》60cm

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
ユーリンMB・ソフトベルト	N10100	1セット	袋	4,480円(税別)	4517850001423


ユーリンMB・ソフトベルトの使用方法

- ① ベルトの長さをご自身のウエストに合わせて調整してください。折り返して止めるだけなので簡単です。
プラスチック角カンが気になる方はガーターをスライドさせて隠せます。

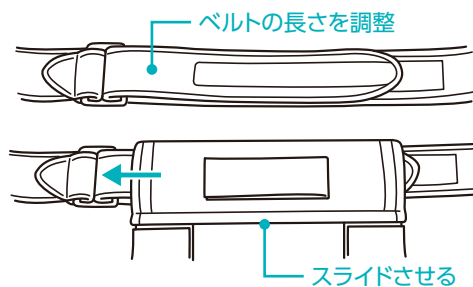


- ② ガーターに付いているワニ口クリップでバッグをはさみ、取り付けてください。

- ③ ワニ口クリップを固定するマジックテープの部分はご自由に切って長さを調整することができます。

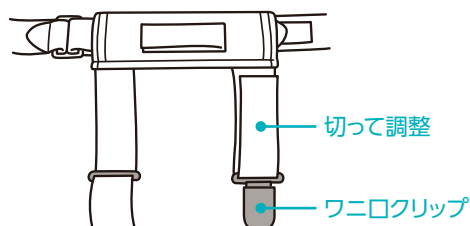


- ④ 装着が完了したら、体から出ている尿管と接続管をつないでください。
接続の際は清潔操作をしてください。

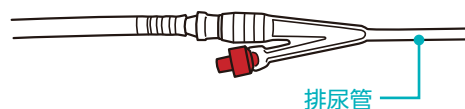

- ⑤ バッグの下部を伸縮足ベルトで太ももに固定してください。
伸縮足ベルトは、切って長さを調整することができます。

- ⑥ ガーター本体に付いているマジックテープを使用して、チューブの固定ができます。

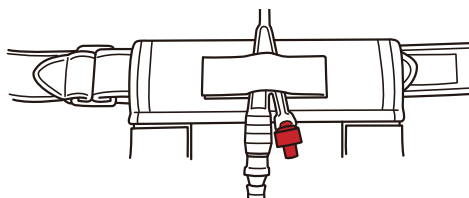

【使用上の注意】

- ユーリンMB・ソフトベルトは、腰ベルトにセットしているガーターにユーリン・ミニ・バッグ（1,000ml、500ml、350ml）を吊り下げて、太ももに装着するためのベルトです。それ以外の用途での使用はしないでください。
- ご自身の都合で、他社のバッグを吊り下げたい場合には、十分ご確認の上、自己責任での使用をお願いします。
- バッグにつきましては、バッグの使用上の注意をご確認ください。
- 鉄製のワニ口クリップを使用していますので、磁気共鳴装置類（MRI、MRA等）使用の際には必ず外してください。

【洗濯方法】



- 洗濯時は必ず鉄製クリップを外し、マジックテープ部分は接着した状態で洗濯してください。

あしかメディ工業株式会社

本社: 〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12 TEL 03-3811-0234 FAX 03-3812-9284
 綾瀬事業所: 〒120-0003 東京都足立区東和3-5-4
 白井事業所: 〒270-1403 千葉県白井市河原子240-17
 yes@asicamedia.co.jp