

使いやすさを追求した携帯蓄尿バッグ

ユーリン・ミニ・バッグ[500ml]

日本製

EOG滅菌済

ディスプレイ

安心して使っていただける500mlサイズ。
ソフトベルトでしっかり固定。

障害者総合支援法により、非課税です。

本バッグは尿管皮膚瘻手術後の蓄尿バッグで患者さんと専門家の協力により開発された商品です。腎瘻の方および尿路ストーマの方用の蓄尿バッグです。社会復帰に際し、できるだけ抵抗なく日常生活を送っていただけるよう小型・軽量とし、さらに感染防止のための逆流防止弁を採用するなど、幅広い角度から検討を加えて商品化しました。どなたにも安心してご使用いただけます。

安心 逆流防止弁付き … どのような体位でも
逆流しません。

安全 ネジ式排液栓 … どのような動作でも漏れる
心配はありません。

快適 小型・軽量 … 装着が簡単で、外部から
目立ちません。

ソフトベルト



材質：綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
《クリップ部》鉄、シリコン
適用範囲：ウエスト55cm～95cm
《伸縮足ベルト》60cm

500mlバッグ



材質：塩ビ、ABS、EVA
サイズ：横136mm×縦240mm
《上部チューブ》
内径6mm×外径8mm×長さ80mm
《排液チューブ》
内径10.5mm×外径13.3mm×長さ80mm
添付接続管：No.11 バルーン専用、ネジ付排液栓

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
ユーリン・ミニ・バッグ [500ml] セット	N10083	500mlバッグ 8枚 ソフトベルト 1セット	箱	11,400円(非課税)	4517850001669
ユーリン・ミニ・バッグ [500ml] バッグ	N10084	500mlバッグ 10枚	箱	9,000円(非課税)	4517850001676



ご使用になる前にご確認ください。
・ネジ付排液栓（ブルー色）は、必ず閉めてからお使い下さい。

■装着の仕方

マジックテープやチューブを切る際は、ケガにご注意ください

①腰ベルトの長さをご自身のウエストに合わせて調整してください。折り返して止めるだけなので簡単です。プラスチック角カンが気になる方はガーターをスライドさせて隠せます。

②ガーターに付いているワニ口クリップでバッグをはさみ、取り付けてください。ワニ口クリップを固定するマジックテープ部分はご自由に切って長さを調整できます。

③バッグの下部に伸縮足ベルトを通します。

④この状態で太ももに、フィットするのを確認して固定します。




⑤バッグ下部のチューブにネジ付排液栓を取り付けます。この際に必ずネジを閉めてください。チューブを切って長さを調整できます。

⑥バッグ上部のチューブに接続管を取り付けます。チューブを切って長さを調整できます。

⑦体から出ている尿管と接続管をつないでください。尿管から尿が漏れないように注意してください。接続の際は清潔に操作してください。


⑧ガーター部分のマジックテープをはがして、上部チューブもしくは尿管をはさみ込むことで固定できます。

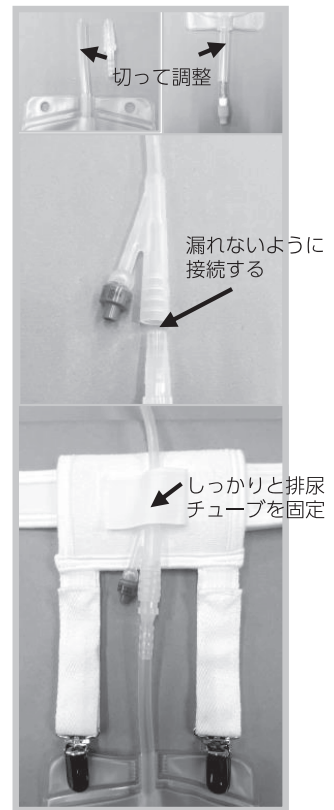

■ご使用上の注意

- ・初めてご使用の場合は、担当の医師又は看護師の指導を受けて下さい。この使用書を読んでもご使用になれますが、専門家の指導を受けられればより安心です。
- ・体から出ているカテーテルと接続管はしっかりと接続して下さい。接続が不完全な場合、尿が漏れることがあります。
- ・バッグに圧力がかかっても逆流防止弁の作用で尿は逆流しません。しかし瞬間的に強い衝撃がかかりますと接着面が剥がれて逆流する危険があります。激しい運動や作業をするときはご注意ください。
- ・バッグの交換時、バルーンカテーテルと接続の際は、接続管の先端部分（カテーテルの中に入る部分）をアルコール等で消毒して下さい。
- ・皮膚の弱い方はバッグと皮膚の間にガーゼをあてて下さい。
- ・就寝時はバッグを置く位置にご注意ください。チューブがねじれたり折れたりして尿の流れが阻害されることがあります。
- ・バッグを装着し、すわったり、寝転んだりする場合は、バッグの中の逆流防止弁が折れないように注意して下さい。弁が折れますと尿がバッグに流れなくなります。長時間座ったりする場合はバッグの位置をずらすなど工夫して下さい。弁に折れぐせがつきますと元に戻らなくなります。

逆流防止弁

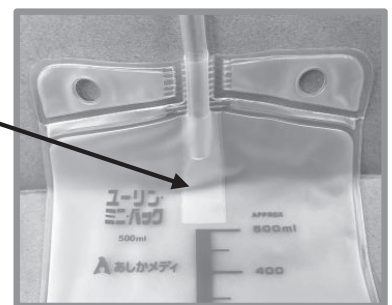

▲図のように逆流防止弁に折れぐせがつくと尿がバッグ内に流れにくくなります。

■バッグの使用期間について

バッグが汚れますと感染の原因にもなりますので、ご使用開始より7～10日間を目安に新しいバッグと交換して下さい。